

Bruksanvisning for Purasomes IRC100

TRINN-FOR-TRINN PROTOKOLL

Trinn 1: Forberedelse av huden

- Rens behandlingsområdet grundig med et antimikrobielt rensemiddel (alkoholfritt rensemiddel).
- Vurder å påføre topisk lokalbedøvelseskrem.
- Sørg for at den kun påføres på ytre overflater.

Trinn 2: Forberedelse av produktet

- Åpne Purasomes IRC100+ ampullen ved å fjerne flippløkket.
- Bruk en steril sprøyte med 21g nål eller en applikator for å trekke ut 2,5 ml av produktet fra ampullen.
- Kast nålen trygt i en egnet kasteskrin for skarpe gjenstander.

Trinn 3: Påføring av produktet

- Bruk sprøyten (uten nål) og påfør dråper av produktet på behandlingsområdet.
- Fordel produktet jevnt over huden etter behov for å sikre grundig dekning.
- Bruk en 0,2 mm Dermastamp eller en Dermapen med dybdejustering til 0,2 mm.

Trinn 4: Sluttpåføring

- Fullfør behandlingen ved å påføre Purasomes IRC100+ Intimate Gel, som inneholder Amplex+ teknologi for forbedret hudregenerering og hydrering.
- Advar pasienten om å forvente en kortvarig varm følelse ved påføring av intim-gelen, som er selvbegrensende og vil avta av seg selv.
- Igjen, dette er kun for utvendig bruk.

Etterbehandling

- Gi pasienten en regenererende gel for daglig bruk for å:
 - Lindre irritasjon.
 - Forbedre mikrosirkulasjon.
 - Forbedre hydrering og følsomhet.
 - Støtte mikrobiomhelse og hudfornyelse.

 Nål (2 X 27G) / Nålinformasjon	 Oppbevares utenfor sollys	 Sluttproduktinformasjon	 CE-merket og identifikasjon nummer av produktet
 Sterilisert med EO-gass (nål)	 Oppbevares i følgende tempera	 Ikke gjenbrukbar	 Produsert av
 Ikke re-steriliser nålen	 Forsiktig	 Bruk innen	 Ikke bruk produktet hvis pakken er skadet
 Ikke bruk nålen igjen	 Holdes tørr	 Sterilisert ved bruk av damp (REVOLAX™ DEEP med Lidokair	 Autorisert representant i EU
 CE-merket og identifikasjonsnummer av produktet (nål)	 LOT	 Produktnummer	 Se bruksanvisningen
 Viktig, se instruksjonene før bruk			

Revisjon: 01-02-2025